
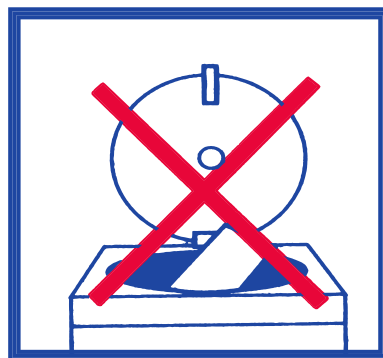


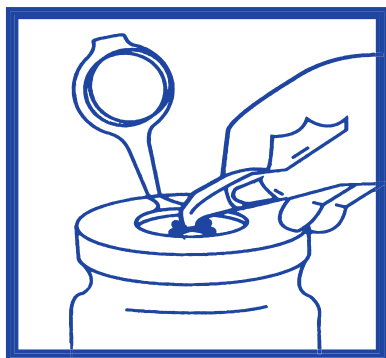

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 1. Zdejmij pokrywę tuby i otwórz opakowanie z chusteczkami w miejscu nacięcia na worku. 2. Rolkę w foliowym opakowaniu umieść w tubie, by chusteczki dłużej utrzymywały poziom nasączenia płynem dezynfekującym. 3. Wyciągnij pierwszą chusteczkę ze środka rolki i przełóż ją przez otwór dozujący w pokrywie. Zapewni to łatwe dozowanie i zrywanie włókniny na perforacji. 4. Zamknij szczelnie pokrywę.

UŻYCIĘ: 1. Otwórz korek tuby i pobierz odpowiednią ilość chusteczek. Aby zerwać listek na perforacji należy pociągnąć włókninę w bok, zahaczając na wysokości perforacji o krawędzie otworu dozującego. Wyciąganie włókniny prosto w górę z dozownika pozwala na pobranie dłuższego fragmentu włókniny. 2. Po pobraniu odpowiedniej ilości chusteczek, zamknij szczelnie korek dozujący. 3. Przecieraj dezynfekowane miejsce do momentu jednolitego pokrycia powierzchni przez płyn, którym nasączona jest chusteczka. Chusteczki mogą pozostawiać smugi na gładkich i połyskujących powierzchniach takich jak: polerowana stal, lustra, szyby itp. 4. Nie splukuj. Poczekać do odparowania/wyschnięcia.

Uwagi: Produkt przechowywać szczelnie zamknięty. W przypadku wyschnięcia chusteczka nie nadaje się do dezynfekcji. Dezynfekowana powierzchnia powinna być umyta i sucha. W przypadku długotrwałej dezynfekcji powierzchni za pomocą chusteczek DDR+ zastosuj rękawice ochronne.